

EXAMVISION™



Blahopřejem k Vaším na míru  
vyrobeným lupovým brýlím



## Obsah

Úvod .....	3
<b>Kontrola kvality, přesná úprava a videa</b>	
Galilean HD & Essential .....	4
Kepler Kompakt .....	6
Kepler Advanced .....	8
<b>Záruka .....</b>	<b>10</b>
<b>Příslušenství k lupovým brýlím ExamVision .....</b>	<b>11</b>
<b>Symboly a pokyny pro správné používání .....</b>	<b>14</b>



## Úvod

---

Vybrali jste si vysoce kvalitní přesný nástroj, který je přizpůsoben Vaším požadavkům. Pokud bude potřeba Vaše lupové brýle upravit, nezapomeňte, že se jedná o složitý přesný nástroj, a proto postupujte důsledně podle videonávodu nebo požádejte o pomoc svého místního prodejce ExamVision.

ExamVision může upravit pracovní vzdálenost na Vašich lupových brýlích a vyměnit předepsané čočky podle toho, jak se časem změní Váš zrak. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte svého místního prodejce ExamVision.

Vaše lupové brýle byly pečlivě a přesně podle Vašich požadavků, a doufáme, že s nimi budete 100% spokojeni.



## Kontrola kvality, přesná úprava a videa

---



### Galilean HD & Essential

**Než začnete se svými novými lupovými brýlemi pracovat, podívejte se na videa ExamVision, abyste se ujistili o správném nastavení a vidění.**

Nastavili jsme u Vašich lupových brýlí Vámi požadovanou pracovní vzdálenost od přední části Vašeho oka k objektu. Tato vzdálenost je zapsána na Kartě kvality přiložené k Vaším novým lupovým brýlím.

Pro optimální čisté vidění, pohodlí a dokonalé nasazení se podívejte na naše video „*Does your loupe fit correctly?*“. Zajistíte tak správnou výšku a úhel lupových brýlí, jak je znázorněno níže:



---

### Videa

Videa ExamVision naleznete na našem kanálu YouTube a Vimeo. Pro okamžité shlédnutí stačí naskenovat tento QR kód:





## Kontrola kvality, přesná úprava a videa

---





### Kepler Kompakt

Než začnete se svými novými lupovými brýlemi pracovat, podívejte se na videa ExamVision, abyste se ujistili o správném nastavení a vidění.

Nastavili jsme u Vašich lupových brýlí Vámi požadovanou pracovní vzdálenost od přední části Vašeho oka k objektu. Tato vzdálenost je zapsána na Kartě kvality přiložené k Vaším novým lupovým brýlím.

Pro optimální čisté vidění, pohodlí a dokonalé nasazení se podívejte na naše video „*Fitting your Kepler Kompakt loupe*“. Zajistíte tak správnou výšku a úhel lupových brýlí, jak je znázorněno níže:

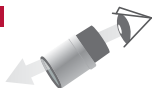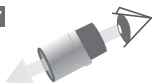

---

### Videa

Videa ExamVision naleznete na našem kanálu YouTube a Vimeo. Pro okamžité shlédnutí stačí naskenovat tento QR kód:







## Kontrola kvality, přesná úprava a videa



### Kepler Advanced

Než začnete se svými novými lupovými brýlemi pracovat, podívejte se na videa ExamVision, abyste se ujistili o správném nastavení a vidění.

Nastavili jsme u Vašich lupových brýlí Vámi požadovanou pracovní vzdálenost od přední části Vašeho oka k objektu. Tato vzdálenost je zapsána na Kartě kvality přiložené k Vaším novým lupovým brýlím.

Musíte své brýle Kepler Advanced detailně doostřit pro každé oko zvlášť na Vaši pracovní vzdálenost. Pro optimální čisté vidění, pohodlí a dokonalé nasazení se podívejte na naše video „*Fitting your Kepler Advanced loupe*“. Zajistíte tak správnou výšku a úhel lupových brýlí, jak je znázorněno níže:



### Videa

Videa ExamVision naleznete na našem kanálu YouTube a Vimeo. Pro okamžité shlédnutí stačí naskenovat tento QR kód:



## Záruka

---

### 5letá záruka výrobce

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Upozorňujeme, že se naše záruka nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním, nedbalostí, náhodným poškozením, úpravami, přepravou v neoriginálním obalu nebo na závady způsobené nesprávným nastavením, údržbou, servisem nebo čištěním. V případě narušené funkčnosti vraťte výrobek k opravě Vašemu prodejci ExamVision.

Viz také: [examvision.com/warranty](http://examvision.com/warranty)



## Příslušenství k lupovým brýlím ExamVision

---



### Nosní sedýlka

Průhledná silikonová nosní sedýlka v různých velikostech.



### Šňůrka na krk

Jemná, ale odolná šňůrka pro větší jistotu při nošení lupových brýlí – se silikonovými koncovkami.



### Svorka na kabel

Nasadíte na bočnice Vašich lupových brýlí svorky na kabel a jemně do svorek vtlačte kabel LED osvětlení.



### Čisticí roztok (bez alkoholu)

Náš speciální čisticí roztok udrží Vaše lupové brýle v perfektním stavu. Použijte malé množství na utěrku z mikrovlákna a bezpečně odstraňte nečistoty, prach a mastnotu z čoček.

## Příslušenství k lupovým brýlím ExamVision

---



### Dezinfekční ubrousky (bez alkoholu)

Naše dezinfekční ubrousky udrží Vaše lupové brýle v perfektním stavu. Tyto jednorázové čisticí ubrousky jsou rychlou a snadnou metodou, jak bezpečně odstranit nečistoty, prach a mastnotu.



### Visionshield (štít ve velikosti L, XL a MAX)

Chrání lupové brýle a Váš obličej před potřísněním a znečištěním. Na lupové brýle ExamVision se snadno nasazuje díky adaptéru Velcro. Velikost L je vhodná pro lupové brýle Galilean HD a Essential a velikost XL pro lupové brýle Kepler. Tyto verze mají výřez pro čelovou lampu.

Visionshield MAX je štít přes celý obličej, který se také snadno upevňuje a je vhodný pro jakékoli lupové brýle ExamVision, aby byla součástí Vaší každodenní rutiny.

Štíty Visionshield ExamVision jsou vyrobeny z nepraskající, pružné plastové fólie, kterou lze snadno očistit, vydezinfikovat a znovu použít.



### Sideshields

Téměř neviditelné, lehoučké postranní kryty chrání oči před potřísněním a nečistotami. Jednorázové, v balení po třech párech.



### Šperky

Pokud by Vám úplné přizpůsobení nestačilo, co takhle přidat diamant? Váš krásný rámeček Icon může zvýraznit 0,02karátový (1,7 mm) diamant zasazený do stříbrného čepu, který ručně vyrábí dánský návrhář šperků. K dispozici jsou také rubíny a safíry. My vše zdokonalíme. Vy si vše přizpůsobíte.



### Barevné koncovky stranic

Antialergické koncovky stranic pro individualizaci a pohodlné dosednutí. Vyrobené z umělé gumy. K dostání v široké škále barev.

Úplný seznam dostupného příslušenství si můžete prohlédnout na:  
[examvision.com/loupes-lights/accessories/](http://examvision.com/loupes-lights/accessories/)



## Symboly a pokyny pro správné používání



### Výrobce

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark.  
www.examvision.com



eRFU Indicator

### Přečtěte si návod k použití

Digitální verze v různých jazycích naleznete na tomto odkazu: [examvision.com/support](http://examvision.com/support)



### Pozor. Správné používání a údržba

Vaše lupové brýle ExamVision jsou přesným nástrojem. Stejně jako u každého kvalitního výrobku je třeba o lupové brýle správně pečovat, abyste je udrželi v prvotřídním stavu. Při běžném každodenním použití budou Vaše lupové brýle potřebovat čas od času servisní kontrolu. Pravidelně je kontrolujte také sami. Pokud si všimnete opotřebení nebo poškození, budou-li se Vám zdát lupové brýle volné nebo nebudou sedět tak dobře jako když byly nové, přestaňte je používat a ihned požádejte o servis a náhradní díly u svého prodejce ExamVision. S drobnými úpravami nebo utažením šroubků Vám může pomoci také Váš místní optik. NIKDY lupové brýle nijak neupravujte.

### Alergie

ExamVision používá u brýlí pouze vysoce kvalitní, na alergie testované materiály. Vaše lupové brýle musí být uzpůsobeny tak, aby se dotýkaly kůže jen nosními sedýlky a koncovkami bočnic. Ve velmi nepravděpodobném případě podráždění se obraťte na svého prodejce ExamVision.

### Péče a čištění

NEPOUŽÍVEJTE k čištění alkohol. Používejte pouze čisticí a dezinfekční prostředky doporučené ExamVision a měkkou utěrku bez chlupů. NESTERILIZUJTE v autoklávu nebo v ultrazvukových čističkách. NEPOUŽÍVEJTE UV imerzní dezinfekční metody.



**Uchovávejte mimo dosah slunečního záření**

Nenechávejte lupové brýle přímo na slunci. Zvětšení může vytvořit „horký bod“, který může způsobit požár.



**Uchovávejte v suchu**



**Křehké, manipulujte opatrně**



**Nepoužívejte, je-li obal poškozený**



 [facebook.com/ExamVisionDK](https://facebook.com/ExamVisionDK)

 [instagram.com/examvision/](https://instagram.com/examvision/)

 [linkedin.com/company/examvision-aps](https://linkedin.com/company/examvision-aps)

[www.examvision.com](https://www.examvision.com)